

Bruksanvisning

Produktbeskrivelse

Dette produktet er et innovativt peelingprodukt som fungerer både som et **eksfolierende og bio-revitaliserende medisinsk utstyr** med løftende effekt. Formuleringen er unik og basert på trikloreddiksyre (TCA), men skiller seg fra tradisjonelle, invasive TCA-peelinger som ofte krever lang restitusjonstid og kan medføre smerte, rødhet og risiko for hyperpigmentering.

Takket være tilstedeværelsen av **ozonider**, spesielle forbindelser som frigjør oksygen i huden, nøytraliseres syrenes aggressive effekt på overflaten. Produktet virker i stedet i de papillære og retikulære dermale lagene, hvor det stimulerer fibroblastaktiviteten og dermed produksjonen av kollagen, elastin og hyaluronsyre.

Effekten forsterkes ytterligere av **mandelsyre**, som bidrar til naturlig cellefornyelse i dermis, og som sammen med **kojicsyre** gir en skånsom eksfolierende og pigmentreducerende effekt på hudoverflaten. Behandlingen bidrar til å gjenopprette hudens ungdommelige utseende, glans og glatthet.

Produktet kan brukes på **ansikt, hals og décolleté**, og på grunn av sin sikkerhet og brukervennlighet er det også egnet for behandling av **slapp hud på brystet**. Oksygenet som frigjøres fra ozonisert olivenolje har antibakterielle egenskaper, noe som gjør produktet velegnet til behandling av **aktiv akne**.

Indikasjoner

Produktet er indisert for bruk på:

- Ansikt
- Hals
- Décolleté
- Solflekker
- Bryst (ved hudslapphet)

Produktet virker på vevsslapphet og kollagenfibre og er også indisert for behandling av **akne i alle former**.

Bruksmetode

1. Forbered huden i henhold til standard behandlingsprotokoll.
2. Bruk en steril sprøyte for å trekke opp ønsket mengde produkt (1–2 ml).
3. Påfør 3–5 dråper på **ren og tørr hud** i følgende rekkefølge:
 - Panne
 - Første kinn
 - Andre kinn
 - Hake
 - Hals
 - Décolleté
4. Masser forsiktig inn til produktet er fullstendig absorbert.
5. Behandlingen kan gjentas ved behov.
6. Etter påføring skal produktet virke i **1–5 minutter**, avhengig av hudtype og klinisk vurdering.
7. Etter virketiden, og basert på medisinsk vurdering, fjernes eventuelt overskuddsprodukt med et nøytraliserende produkt, og huden tørkes forsiktig.
8. Det anbefales å påføre «**Universal Post Peeling**» krem med fuktighetsgivende, nærende og beroligende egenskaper samt solbeskyttelse etter behandlingen og i dagene som følger.

Advarsler

- Skal ikke svelges.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Emballasjen skal holdes godt lukket og beskyttes mot varmekilder.
- Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart med rikelig vann.
- Skal ikke brukes etter utløpsdato.

Oppbevaring

Oppbevares på et kjølig, tørt og rent sted ved temperatur mellom **5 °C og 25 °C**, beskyttet mot lys og varmekilder.

Presentasjon

Hver pakning inneholder **6 ferdigfylte hetteglass à 6 ml**, klare til bruk.

Bivirkninger og kontraindikasjoner

Etter behandling kan det, avhengig av individuell hudfølsomhet, forekomme:

- Hyperpigmentering
- Arrdannelse
- Infeksjoner
- Vedvarende erytem
- Appelsinhud-effekt
- Glansfull hud
- Hypopigmentering

Produktet er **kontraindisert** ved:

- Kardiovaskulær sykdom
- Astma
- Psykiske lidelser
- Allergier
- Autoimmune sykdommer


- Pågående behandling med antikoagulantia

- Graviditet

- Tendens til keloiddannelse

Ingredienser

Aqua, Propylenglykol, Trikloreddiksyre, Polysorbat 20, Mandelsyre, Ozonisert olivenolje, Kojicsyre, Acetyl hexapeptid-8, Caprylylglykol, Xantangummi

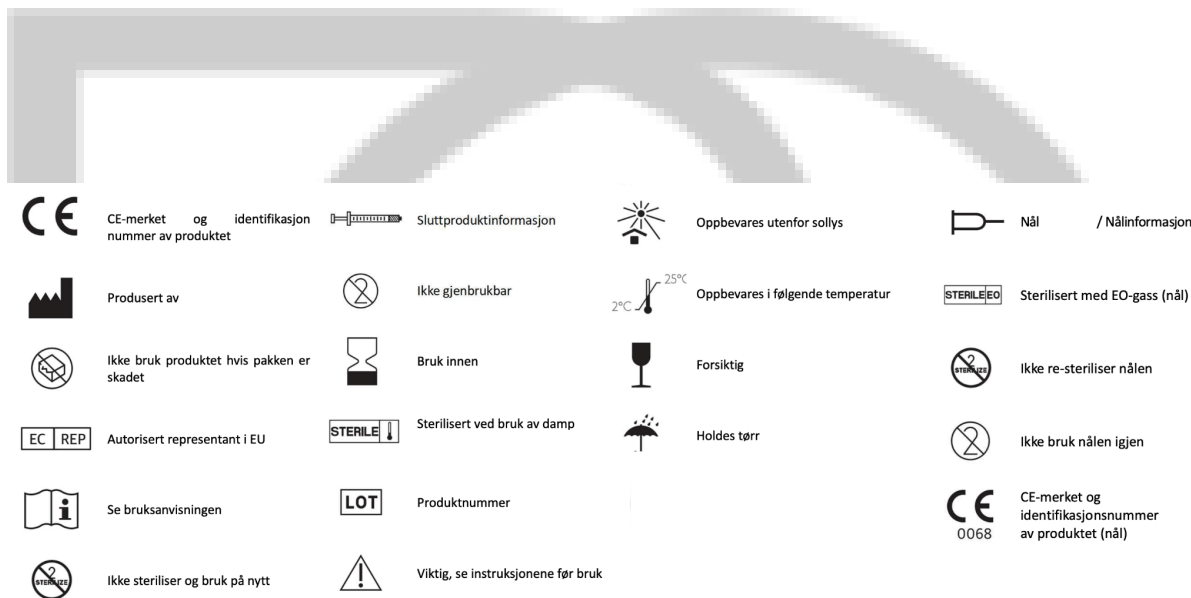

BEST CONNECTION