

Face & Body

Bio-revitaliserende serum

Medisinsk utstyr – Kun for profesjonelt bruk

BRUKSANVISNING (IFU)

Kun for medisinsk personell

Pakningsinnhold: 6 hetteglass à 6 ml

Oppbevaring: 5–25 °C, tørt og mørkt

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Formuleringen av dette nye peelingproduktet er absolutt unik og innovativ. Produktet betraktes som en løftende, eksfolierende og bio-revitaliserende medisinsk enhet. Eksfolieringseffekten oppnås gjennom tilstedeværelsen av trikloreddiksyre (TCA), men skiller seg fra vanlig invasiv TCA-peeling – som krever lengre restitusjonstid med smerte, rødhet og risiko for hyperpigmentering – fordi det virker i det dype dermale laget uten å fremkalle irritasjon i den overflatiske huden.

Dette skyldes tilstedeværelsen av **Ozonider** – spesielle forbindelser som frigjør oksygen på huden og nøytraliserer syreaggressiviteten, og samtidig stimulerer aktiviteten til fibroblaster i papillar- og retikulærdermis, som er ansvarlige for produksjonen av kollagen, elastin og hyaluronsyre i dermis.

Denne aktiviteten forsterkes av tilstedeværelsen av **mandelinsyre**, som bidrar til naturlig celleomsetning i dermis, mens **kojisyre** på overflaten utøver en mild eksfolierende effekt og lysner pigmentflekker.

Denne behandlingen vil gjenopprette et ungdommelig, glanset og glatt hudutseende. Produktet kan, i tillegg til ansiktet, påføres på nakke og dekolletasje. På grunn av sine sikkerhets- og brukervennlighetsegenskaper er det også egnet for avslapnet hud på brystet. Videre gjør oksygenet som frigjøres fra ionisert olivenolje, med sin antibakterielle virkning, produktet til en utmerket behandling ved aktiv akne.

2. INDIKASJONER

Produktet påføres på ansikt, nakke, dekolletasje, solflekker og bryst, og virker på vevsavslapning og kollagenfibre. Det er også indisert for behandling av akne i alle dens manifestasjoner.

Behandlingsområder:

- Ansikt (panne, kinn, hake, nese)
- Nakke og dekolletasje
- Bryst (avslapnet hud)
- Solflekker og pigmenterte områder
- Aktiv akne
- Overflatiske rynker og linjer
- Tap av hudtonus og elastisitet

3. SAMMENSETNING / INGREDIENSER

Aqua, Propylenglykol, Trikloreddiksyre (TCA), Polysorbat 20, Mandelinsyre, Oksonidholdige olivenolje, Kojisyre, Acetylheksapeptid-8, Kaprylglykol, Xantangummi.

Nøkkelpoengter og virkningsmekanisme:

Komponent	Funksjon
Trikloreddiksyre (TCA)	Eksfoliering i dypt dermislag uten overflattisk irritasjon
Ozonider (fra ionisert olivenolje)	Frigjør oksygen, nøytraliserer syreaggressivitet, stimulerer fibroblaster
Mandelinsyre	Fremmer naturlig celleomsetning i dermis
Kojisyre	Mild eksfoliering, lysner pigmentflekker
Acetylheksapeptid-8	Stimulerer kollagen, elastin og hyaluronsyreproduksjon
Ionisert olivenolje	Antibakteriell virkning, behandling av aktiv akne

4. KONTRAINDIKASJONER

Peelingen er kontraindisert ved:

- Hjerte- og karsykdommer
- Astma

- Psykiske sykdommer
- Allergier
- Autoimmune sykdommer
- Pågående behandling med antikoagulantia
- Graviditet
- Keloider
- Kjent overfølsomhet for noen av produktets ingredienser

5. ADVARSLER

■ Må ikke svelges. Hold utilgjengelig for barn.

■ Oppbevar emballasjen godt lukket og beskyttet mot varmekilder. Ved kontakt med øynene – skyll umiddelbart med vann. Bruk ikke etter utløpsdatoen.

■ Subkutan injeksjon av TCA er strengt forbudt.

6. BIVIRKNINGER

Etter behandling og avhengig av subjektiv hudsensitivitet kan det forekomme:

- Hyperpigmentering
- Arr
- Infeksjoner
- Vedvarende erytem (rødhet)
- Appelsinhudseffekt
- Skinnende/tynn hud
- Hypopigmentering

Disse bivirkningene er vanligvis midlertidige. Kontakt behandlende lege ved vedvarende eller alvorlige reaksjoner.

7. BRUKSANVISNING / PROSEDYRE

Svært viktig: Produktet skal kun brukes av kvalifisert medisinsk personell. Legen skal vurdere pasientens hud og foreta anamnese før behandling.

Forberedelse:

1. Rens og tørk huden grundig.
2. Bruk en steril sprøyte til å trekke opp nødvendig mengde produkt (1–2 ml).
3. Fest en egnet nål/kanyle på sprøyten.

Påføring:

1. Påfør 3–5 dråper av produktet på de (tørre og rene) hudoverflatene som skal behandles i følgende rekkefølge: panne, første kinn, annet kinn, hake, nakke, dekolletasje – og massér til produktet er fullstendig absorbert.
2. Gjenta behandlingen om nødvendig.
3. Når produktet er påført de berørte områdene, er det nødvendig å vente til det setter seg (1–5 minutter), noe som varierer avhengig av hudtypen som behandles.
4. Etter at påføringstiden er over, og etter legens vurdering, fjernes eventuelt overskuddsprodukt med nøytraliserende produkt og huden tørkes forsiktig.
5. Bruk av "Universal Post Peeling"-krem med fuktighetsgivende, nærende og beroligende egenskaper samt solkrem anbefales etter behandlingen og i de påfølgende dagene.

Etter behandling:

- Ikke bruk sminke i behandlingsområdet i 24 timer etter behandling.
- Unngå direkte sollys, UV-lamper, ekstrem varme eller kulde i restitusjonsperioden.
- Bruk solkrem i dagene etter behandlingen.

- Inflammatoriske reaksjoner kan oppstå dersom laser, kjemisk peeling eller dermoabrasive behandlinger gis etter bruk. Produktet bør kun brukes når effektene av en eventuell tidligere behandling har forsvunnet helt.

8. DOSERING

Påfør 3–5 dråper per behandlingsøkt. Mengden tilpasses individuelt av behandlende lege basert på hudtype og behandlingsomfang.

Ventetid etter påføring: 1–5 minutter, avhengig av hudtype.

9. PAKNINGSINNHold OG OPPBEVARING

Pakningsinnhold:

- 6 hetteglass à 6 ml, klare til bruk

Oppbevaring:

- Oppbevar på et kjølig, tørt og rent sted
- Temperatur: 5–25 °C
- Hold borte fra lys og varmekilder
- Hold utilgjengelig for barn
- Bruk ikke etter utløpsdatoen angitt på emballasjen

10. SYMBOLER PÅ EMBALLASJEN

Symbol	Betydning	Forklaring
MD	Medisinsk utstyr	Produktet er klassifisert som medisinsk utstyr
CE	CE-merke	Produktet er i samsvar med gjeldende EU-direktiver for medisinsk utstyr
⊗	Ikke gjenbruk	Engangsprodukt – må ikke gjenbrukes
■ i	Les bruksanvisning	Følg bruksanvisningen nøye før bruk
■	Utløpsdato	Bruk ikke etter angitt dato
LOT	Batchnummer	Identifikasjonsnummer for produksjonsbatch (lot)
■	Hold tørt	Beskytt mot fuktighet
■ X	Beskytt mot sollys	Oppbevar utilgjengelig for direkte sollys
5°C – 25°C	Temperaturgrense	Oppbevar ved temperatur mellom 5 °C og 25 °C
■■	Produsent	Navn og adresse til produsenten
■	Produksjonsdato	Dato for produksjon av produktet
REF	Produktkode	Produsentens referansenummer for produktet
■	Skadet emballasje	Bruk ikke produktet hvis emballasjen er skadet
γ	Skjørt	Håndter med forsiktighet – skjørt produkt
■ X	Utilgjengelig for barn	Oppbevar utilgjengelig for barn
■	Forsiktig	Les medfølgende dokumentasjon

11. PRODUSENT OG REGULATORISK INFORMASJON

Produsent:

(Kontakt distributør eller leverandør for fullstendig produsentinformasjon)

Produkt:

Face and Body Bio-revitalizing Serum

Medisinsk utstyr – Kun for profesjonelt bruk

Klassifisering:

Medisinsk utstyr til profesjonelt bruk

Bruksområde:

Eksfolierende og bio-revitaliserende behandling

Ansikt, nakke, dekolletasje, bryst

Aknebehandling, pigmentflekker

Regulatorisk:

CE-merket medisinsk utstyr

Pakningsinnhold:

6 x 6 ml hetteglass

Klare til bruk

Face and Body Bio-revitalizing Serum – Bruksanvisning (IFU) | Norsk oversettelse basert på pakningsinformasjon | Medisinsk utstyr – Kun for profesjonelt bruk | Oppbevar 5–25 °C