

LUMI-PRO LIP BOOSTER

Produktinformasjon

- **Produktnavn:** LUMI-PRO Lips
- **Produktspesifikasjon:** 1 ferdigfylt sprøyte x 1,1 ml | 1 eske
- **Produksjonsdato:** Angitt på ytteresken
- **Oppbevaring:** Oppbevares i romtemperatur

Sammensetning

- Natriumhyaluronat: 22 mg/1,1 ml

Indikasjon

- Hudbalansering, forbedring av elastisitet, fuktighetsgivende

Bruksanvisning

1. Rengjør huden før bruk
2. Kontroller at ytter- og inneremballasjen er lukket og ikke er skadet
3. Sjekk produktets utløpsdato før bruk
4. Dette er et engangsprodukt
5. Produktet skal oppbevares i romtemperatur

Anbefales med lineære tråder (klassisk leppe-teknikk) og kan utføres hver 3.–4. måned, tilpasset kundens behov og mål.

Du kan fordele innholdet jevnt mellom alle fire kvadranter av leppene, men for tynnere lepper kan du bruke mindre enn hele 1,1 ml-sprøyten etter eget skjønn – på samme måte som ved bruk av filler.

En behandlingsserie med én behandling hver 1.–2. måned er et godt alternativ for kunder uten filler, for dem som nylig har fått filler løst opp, eller for modne kunder som mister kollagen.

Når det gjelder nedetid, er dette en mindre invasiv behandling enn filler, men du bør likevel forberede kunden på en tilsvarende helingsprosess.

Den synlige plumpheten varer vanligvis i 7–14 dager.

Siden dette ikke er kryssbundet hyaluronsyre, er målet ikke å endre leppens størrelse eller struktur.

Fuktigheten i leppene forbedres gradvis over tid, og kollagenproduksjonen skjer trinnvis, slik som ved andre skinboostere.

Ingredienser

Aqua, Natriumhyaluronat, Natriumklorid, Dinatriumfosfat, Natriumfosfat

Ekklusiv distributør Norge

Best Connection AS

Produsert av:

BNC KOREA, Inc.

BNC KOREA, Inc., (Daegu Techno Park Venture Factory No. 1, Hosan-dong)
Rm.405, 62, Seongseogongdan-ro 11-gil, Dalseo-gu, Daegu, Republikken Korea

UK RP: LUAMED INT LTD., 128 CITY ROAD, LONDON, EC1V 2NX, UK

EU RP: LINDA DI ZIDAN TANJA, VIA DELLA TESA 20, 34138 Trieste, Italia

Nominelt innhold: 1,1 ml

Produsert i Korea



BEST CONNECTION

www.bestconnection.no



BEST CONNECTION

