

Bruksanvisning for Seventy hyal 2000

PRODUKTET ER MENT FOR EKSKLUSIVT BRUK AV MEDISINSK PERSONELL.

Seventy Hyal 2000

1,5 % natriumhyaluronat med høy molekylvekt

- 2000 kDa – løsning for intradermal injeksjon.

Oppbevares ved temperatur **ikke over 25 °C**, i originalemballasjen og **beskyttet mot lys**. Les spesielle advarsler nøye før bruk.

Innholdet i sprøyten er sterilisert med fuktig varme.

Ferdigfylte sprøyter til engangsbruk, hver inneholder **30 mg / 2 ml**.

FORHOLDSREGLER FOR BRUK / SPESIALE ADVARSLER

- Bruk de vanlige forholdsreglene ved intradermale infiltrasjoner.
- Som med alle perkutane behandlinger, kan bruken av produktet medføre risiko for infeksjon.
- Behandlingen kan føre til en lett stikkende følelse som forsvinner etter noen minutter.
- Det behandlede området kan vise reaksjoner som vanligvis er forbundet med injeksjonstram, som hevelse og erytem, som vanligvis går tilbake spontant innen noen timer etter behandlingen.

Generelt er den tekniske ferdigheten til legen avgjørende for behandlingenes suksess.

- Enhver modifikasjon eller bruk av dette produktet, annet enn de bruksvilkårene som er definert i dette dokumentet, kan skade steriliteten og ytelsen, som da ikke lenger kan garanteres.

Før behandlingen påbegynnes, anbefales det å informere pasienten om indikasjonene og kontraindikasjonene for selve enheten, dens inkompatibiliteter og mulige uønskede effekter som kan forekomme.

Før injeksjonen, desinfiser grundig området som skal behandles.

- Injiser sakte.
- Unnlatelse av å overholde disse forholdsreglene kan føre til risiko for nåleløsning og/eller tap av produkt ved luer-lock.
- Mengden produkt som skal injiseres, vil avhenge av området som skal korrigeres.
- Etter injeksjonen er det viktig å massere det behandlede området for å sikre jevn fordeling av produktet.

KONTRAINDIKASJONER

IKKE BRUK PRODUKTET TIL ANNET ENN DE ANBEFALTE BRUKENE I DENNE PAKNINGSVEDLEGG.

- Ikke injiser i blodårer (intravaskulært).
- Ikke overskrid den korrigerende handlingen.

- Ikke bruk i tilfelle individuell overfølsomhet for produktet.
- Ikke bruk i pasienter som lider av vaskulære kollagenopatier og autoimmune sykdommer i bindevevet (bindevevssykdommer).
- Ikke injiser i hudområder der det pågår infeksjon eller betennelse.
- Anbefales ikke under graviditet og amming, selv om ingen spesifikke kontraindikasjoner er kjent.
- Ikke injiser i pasienter som lider av ukontrollert epilepsi gjennom medisinsk behandling.
- Ikke injiser i pasienter med en tendens til å utvikle hypertrofiske arr eller med porfyri.
- Ikke injiser i pasienter som har kjent overfølsomhet for stoffene som finnes i fyllet.
- Ikke bruk hos pasienter under 18 år.
- Ikke bruk produktet i umiddelbar tilknytning til en laserbehandling, dyp kjemisk peeling eller dermabrasjon.
I tilfelle av overfladisk peeling, anbefales det ikke å injisere dersom den inflammatoriske reaksjonen som provoseres er betydelig.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.

	CE-merket og identifikasjon nummer av produktet		Sluttproduktinformasjon		Oppbevares utenfor sollys		Nål / Nålinformasjon
	Produsert av		Ikke gjenbrukbar		25°C Oppbevares i følgende temperatur		Sterilisert med EO-gass (nål)
	Ikke bruk produktet hvis pakken er skadet		Bruk innen		Forsiktig		Ikke re-steriliser nålen
	Autorisert representant i EU		Sterilisert ved bruk av damp		Holdes tørr		Ikke bruk nålen igjen
	Se bruksanvisningen		Produktnummer				CE-merket og identifikasjonsnummer av produktet (nål)
	Ikke steriliser og bruk på nytt		Viktig, se instruksjonene før bruk				

Revisjon: 01-05-2025

BEST CONNECTION